



## Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen und beachten.  
Bitte heben Sie die Gebrauchsanweisung auf.  
Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

# easydrop®

HYALURON  
PLUS DEXPANTHENOL



mibe GmbH  
Arzneimittel  
Münchener Straße 15  
06796 Brehna  
Tel.: 034954/247-0  
Fax: 034954/247-100

## Zur verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche

### WAS IST easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL UND WIE IST ES ZUSAMMENGESETZT?

easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol ist eine klare, sterile, wässrige, konservierungsmittelfreie Lösung mit 1,5mg/ml Natriumhyaluronat, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure, und Dexpanthenol. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die im Körper unter anderem auch im gesunden menschlichen Auge und in der natürlichen Tränenflüssigkeit vorkommt. Dexpanthenol gehört zur Gruppe der B-Vitamine. Es unterstützt durch seine filmbildenden und wasserbindenden Eigenschaften die befeuchtende Wirkung des Natriumhyaluronats.

Um eine gute Verträglichkeit im Auge zu gewährleisten enthalten die Augentropfen neben Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke einen niedrig dosierten Phosphatpuffer sowie sehr geringe Mengen an Chlorwasserstoffsäure beziehungsweise Natriumhydroxid zur pH-Einstellung. Mit Hilfe dieser Bestandteile werden die physikalischen Eigenschaften der Augentropfen an die der natürlichen Tränenflüssigkeit angepasst.

### WANN SOLLTEN SIE easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL ANWENDEN?

easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol dient der Feuchterhaltung und verbesserter Befeuchtung der Augenoberfläche, um Beschwerden wie Trockenheitsgefühl, Jucken, Brennen, Rötung, Sandkorngefühl oder Müdigkeit der Augen vorzubeugen. Diese Beschwerden können mit einer mangelnden Befeuchtung der Augen in Zusammenhang stehen, die z. B. durch

- mechanische Beanspruchung (z. B. Tragen von Kontaktlinsen, nach diagnostischen Eingriffen)
- Umweltstress (z. B. durch Klimaanlage, Wind, Zugluft, trockene Raumluft, trockene Hitze, Kälte, Staub, Luftverschmutzung, Zigarettenrauch oder Sauna-/Schwimmbadbesuch)
- langes, intensives Sehen (z. B. Arbeiten an Computerbildschirmen und Mikroskopen sowie bei längerem Fernsehen oder längeren Autofahrten).

verursacht werden kann.

easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol ist auch zum Benetzen und Nachbenetzen aller harten und weichen Kontaktlinsen sehr gut geeignet. Durch den entstehenden Feuchtigkeitsfilm wird das Einsetzen und Herausnehmen der Kontaktlinsen er-

leichtert. Verträglichkeit und Tragekomfort werden deutlich erhöht.

### WIE WIRKT easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL?

Um die volle Funktionsfähigkeit der äußeren Augengewebe, Bindehaut und Hornhaut zu erhalten, müssen diese ständig vom Tränenfilm befeuchtet werden. Ist das durch die natürliche Tränenflüssigkeit aufgrund verschiedener Ursachen nicht möglich oder eingeschränkt, kann die regelmäßige Anwendung von easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol den natürlichen Tränenfilm unterstützen und stabilisieren, die Gleitfähigkeit der Augenoberfläche verbessern und so vorbeugend zum Schutz der Augen beitragen.

Dazu bildet easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol auf der Augenoberfläche einen gleichmäßigen stabilen und besonders lang haftenden Gleit- und Schutzfilm, ohne die Sehleistung des Auges zu beeinträchtigen oder rasch abgespült zu werden.

Dieser Feuchtigkeitsfilm pflegt Horn- und Bindehaut des Auges und bewirkt zusammen mit der natürlichen Tränenflüssigkeit eine sehr gute Gleitfähigkeit des Augelides beim Lidschlag. Das Auge wird so vor Reizungen und Trockenheitsgefühl geschützt.

easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol führt zu einer spürbaren und langanhaltenden Erleichterung vor drohenden umgebungsbedingten Augenreizungen. easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol schützt, erfrischt und beruhigt Ihre Augen.

### WAS MÜSSEN SIE BEI DER ANWENDUNG VON easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL BEACHTEN?

Wenn Sie wissen, dass Sie auf einen Inhaltsstoff von easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol allergisch reagieren, dürfen Sie diese Augentropfen nicht anwenden.

Bei einer bestehenden Augeninfektion dürfen Sie easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol nicht anwenden.

Bringen Sie keine anderen Augentropfen oder Augensalben zusammen mit easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol zum gleichen Zeitpunkt in das Auge ein, damit sich die Wirkungen nicht gegenseitig beeinflussen.

Es gibt keine Hinweise auf ein Risiko für die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit. Die Wirkung von easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol

beruht auf einem rein physikalischen Prinzip und ist auf das Auge begrenzt. Die Augentropfen können daher in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. In sehr seltenen Fällen entwickelten Patienten mit ausgeprägten Hornhautschädigungen unter Anwendung von phosphathaltigen Augentropfen Trübungen der Hornhaut durch Kalkablagerungen.

easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol ist konservierungsmittelfrei und deshalb auch bei längerer Anwendung sehr gut verträglich. Sollten jedoch in sehr seltenen Fällen brennende und tränende Augen auftreten, deutet dies auf eine Überempfindlichkeitsreaktion hin. Sie dürfen die Augentropfen dann nicht weiter benutzen.

#### WIE WENDEN SIE easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL AN?

Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob die Flasche original verschlossen und unbeschädigt ist.

Vermerken Sie bitte den Tag der ersten Öffnung auf der Faltschachtel.

Je nach Bedarf geben Sie bitte ein- bis mehrmals täglich je 1–2 Tropfen easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol in jedes Auge.


Gehen Sie beim Eintropfen der Flüssigkeit folgendermaßen vor:

Schrauben Sie die Schutzkappe ab.




Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken. Ziehen Sie mit einem Finger das Unterlid leicht nach unten.

Schauen Sie nach oben und richten Sie Ihren Blick auf einen festen Punkt. So können Sie ein Blinzeln des Augenlides unterdrücken.

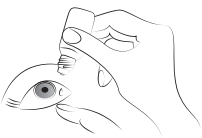

Halten Sie die Flasche mit der blauen Spitze nach unten dicht oberhalb des Unterlides. Nun drücken Sie leicht auf die Flasche, bis ein Tropfen in den Bindehautsack fällt. Wichtig ist, dass Sie mit der Tropferoberfläche dabei nicht das Auge oder die Gesichtshaut berühren.

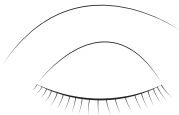

Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilen kann.

Schütteln Sie einen etwaigen Resttropfen von der Flasche ab und verschließen Sie diese durch sorgfältiges Aufschrauben der Schutzkappe.

Falls Sie Kontaktlinsen tragen, können Sie die Augentropfen auch direkt auf die Kontaktlinsen geben, bevor Sie diese einsetzen.

#### Hinweise:

Durch den erhöhten Luftdruck bei der keimfreien Herstellung im Reinraum kann es nach dem ersten Öffnen der Flasche beim ersten Tropfen zu einer leichten Strahlbildung kommen. Bitte werfen Sie die Menge Augentropfen einfach. Die Entnehmbarkeit des deklarierten Volumens von 10ml easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol ist auch danach garantiert. easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und steril abgefüllt. Bitte versuchen Sie nicht die Flasche gewaltsam zu öffnen. Wenn die Flasche nicht intakt oder die enthaltene Lösung nicht klar ist, dürfen Sie die Augentropfen nicht mehr verwenden. Bitte berühren Sie die Tropferoberfläche nicht und wischen Sie diese auch nicht ab. easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol darf aus hygienischen Gründen nur von derselben Person benutzt werden.

#### WIE LANGE KANN easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL ANGEWENDET WERDEN?

Die Dauer der Anwendung ist nicht beschränkt. easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol ist zur Daueranwendung geeignet.

Wenn unter der Anwendung von easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol stärkere Beschwerden auftreten, sollten Sie einen Augenarzt um Rat fragen.

#### WIE LANGE IST easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL HALTBAR?

☞ Sie dürfen easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

🗑 Nach Anbruch der Flasche ist easydrop® Hyaluron plus Dexpanthenol 6 Monate haltbar.

#### WIE IST easydrop® HYALURON PLUS DEXPANTHENOL AUFZUBEWAHREN?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

🌡 +25°C Nicht unter 2°C und nicht über 25°C aufbewahren.


Bewahren Sie die Flasche in der Faltschachtel auf.

STERILE A

#### Packungsgröße:

1 Tropfflasche mit 10 ml Lösung

#### Hersteller:

 **mibe** GmbH Arzneimittel  
Münchener Str. 15  
06796 Brehna  
Tel.: +49 (0) 34954/247-0  
Fax: +49 (0) 34954/247-100

#### Stand der Information

September 2017

CE 0483

