



### **Gebrauchsinformation**

Bitte sorgfältig lesen und beachten.

Bitte heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

### **easydrop® Hyaluron liquid**

Zur verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche

#### **Was ist easydrop Hyaluron liquid und wie ist es zusammengesetzt?**

easydrop Hyaluron liquid ist eine klare, sterile, wässrige, konservierungsmittelfreie Lösung mit 1,7 mg/ml Natriumhyaluronat, dem Natriumsalz der Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die im Körper unter anderem auch im gesunden menschlichen Auge und in der natürlichen Tränenflüssigkeit vorkommt.

Um eine gute Verträglichkeit im Auge zu gewährleisten enthalten die Augentropfen neben Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke einen niedrig dosierten Phosphatpuffer sowie sehr geringe Mengen an Chlorwasserstoffsäure beziehungsweise Natriumhydroxid zur pH-Einstellung. Mit Hilfe dieser Bestandteile werden die physikalischen Eigenschaften der Augentropfen an die der natürlichen Tränenflüssigkeit angepasst.

#### **Wann sollten Sie easydrop Hyaluron liquid anwenden?**

easydrop Hyaluron liquid dient der verbesserten Befeuchtung der Augenoberfläche, wenn Beschwerden wie Trockenheitsgefühl, Jucken, Brennen, Rötung, Sandkorngefühl oder Müdigkeit der Augen bestehen. Diese Beschwerden können mit einer mangelnden Befeuchtung der Augen in Zusammenhang stehen, die z. B. durch

- mechanische Beanspruchung (z. B. Tragen von Kontaktlinsen, nach chirurgischen Eingriffen)
- Umweltstress (z. B. durch Klimaanlage, Wind, Zugluft, trockene Raumluft, trockene Hitze, Kälte, Staub, Luftverschmutzung, Zigarettenrauch oder Sauna-/Schwimmbadbesuch)
- langes, intensives Sehen (z. B. Arbeiten an Computerbildschirmen und Mikroskopen sowie bei längerem Fernsehen oder längeren Autofahrten).

verursacht werden kann.

easydrop Hyaluron liquid ist auch zum Benetzen und Nachbenetzen aller harten und weichen Kontaktlinsen sehr gut geeignet. Durch den entstehenden Feuchtigkeitsfilm wird das Einsetzen und Herausnehmen der Kontaktlinsen erleichtert. Verträglichkeit und Tragekomfort werden deutlich erhöht.

#### **Wie wirkt easydrop Hyaluron liquid?**

Um die volle Funktionsfähigkeit der äußeren Augengewebe, Bindehaut und Hornhaut zu erhalten, müssen diese ständig vom Tränenfilm befeuchtet werden. Ist das durch die natürliche Tränenflüssigkeit aufgrund verschiedener Ursachen nicht möglich oder eingeschränkt, kann die regelmäßige Anwendung von easydrop Hyaluron liquid den natürlichen Tränenfilm unterstützen und stabilisieren, zum Schutz und zur Befeuchtung der Augen beitragen, die Gleitfähigkeit der Augenoberfläche verbessern und so Beschwerden lindern.

Dazu bildet easydrop Hyaluron liquid auf der Augenoberfläche einen gleichmäßigen stabilen und besonders lang haftenden Gleit- und Schutzfilm, ohne die Sehleistung des Auges zu beeinträchtigen oder rasch abgespült zu werden.

Dieser Feuchtigkeitsfilm pflegt Horn- und Bindehaut des Auges und bewirkt zusammen mit der natürlichen Tränenflüssigkeit eine sehr gute Gleitfähigkeit des Augenlides beim Lidschlag. Das Auge wird so vor Reizungen und Trockenheitsgefühl geschützt.

easydrop Hyaluron liquid führt zu einer sofort spürbaren und langanhaltenden Erleichterung bei umgebungsbedingten Augenreizungen. easydrop Hyaluron liquid schützt, erfrischt und beruhigt Ihre Augen.

### **Was müssen Sie bei der Anwendung von easydrop Hyaluron liquid beachten?**

Wenn Sie wissen, dass Sie auf einen Inhaltsstoff von easydrop Hyaluron liquid allergisch reagieren, dürfen Sie diese Augentropfen nicht anwenden.

Bei einer bestehenden Augeninfektion dürfen Sie easydrop Hyaluron liquid nicht anwenden.

Bringen Sie keine anderen Augentropfen oder Augensalben zusammen mit easydrop Hyaluron liquid zum gleichen Zeitpunkt in das Auge ein, damit sich die Wirkungen nicht gegenseitig beeinflussen.

Direkt nach der Anwendung von easydrop Hyaluron liquid kann es kurzzeitig zu verschwommenem Sehen kommen. Bitte bedienen Sie in diesem Fall keine Maschinen und fahren Sie nicht Auto.

Es gibt keine Hinweise auf ein Risiko für die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit. Die Wirkung von easydrop Hyaluron liquid beruht auf einem rein physikalischen Prinzip und ist auf das Auge begrenzt. Die Augentropfen können daher in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

In sehr seltenen Fällen entwickelten Patienten mit ausgeprägten Hornhautschädigungen unter der Behandlung mit phosphathaltigen Augentropfen Trübungen der Hornhaut durch Kalkablagerungen.

easydrop Hyaluron liquid ist konservierungsmittelfrei und deshalb auch bei längerer Anwendung sehr gut verträglich. Sollten jedoch in sehr seltenen Fällen brennende und tränende Augen auftreten, deutet dies auf eine Überempfindlichkeitsreaktion hin. Sie dürfen die Augentropfen dann nicht weiter benutzen.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit easydrop Hyaluron liquid aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und die zuständige Behörde in ihrem Land.


### **Wie wenden Sie easydrop Hyaluron liquid an?**

Bitte prüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob die Flasche original verschlossen und unbeschädigt ist. Vermerken Sie bitte den Tag der ersten Öffnung auf der Faltschachtel.

Je nach Bedarf geben Sie bitte ein- bis mehrmals täglich je 1 - 2 Tropfen easydrop Hyaluron liquid in jedes Auge.

Gehen Sie beim Eintropfen der Flüssigkeit folgendermaßen vor:


Schrauben Sie die Schutzkappe ab.

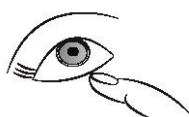


Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken. Ziehen Sie mit einem Finger das Unterlid leicht nach unten.

Schauen Sie nach oben und richten Sie Ihren Blick auf einen festen Punkt. So können Sie ein Blinzeln des Augenlides unterdrücken.

Halten Sie die Flasche mit der blauen Spitze nach unten dicht oberhalb des Unterlides. Nun drücken Sie leicht auf die Flasche, bis

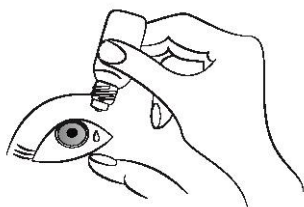

ein Tropfen in den Bindehautsack fällt. Wichtig ist, dass Sie mit der Tropferoberfläche dabei nicht das Auge oder die Gesichtshaut berühren.

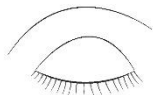

Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig verteilen kann.

Schütteln Sie einen etwaigen Resttropfen von der Flasche ab und verschließen Sie diese durch sorgfältiges Aufschrauben der Schutzkappe.

Falls Sie Kontaktlinsen tragen, können Sie die Augentropfen auch direkt auf die Kontaktlinsen geben, bevor Sie diese einsetzen.

#### Hinweise:

Durch den erhöhten Luftdruck bei der keimfreien Herstellung im Reinraum kann es nach dem ersten Öffnen der Flasche beim ersten Tropfen zu einer leichten Strahlbildung kommen. Bitte werfen Sie die Menge Augentropfen einfach. Die Entnehmbarkeit des deklarierten Volumens von 10 ml easydrop Hyaluron liquid ist auch danach garantiert.

easydrop Hyaluron liquid wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und steril abgefüllt. Bitte versuchen Sie nicht die Flasche gewaltsam zu öffnen. Wenn die Flasche nicht intakt oder die enthaltene Lösung nicht klar ist, dürfen Sie die Augentropfen nicht mehr verwenden.

Bitte berühren Sie die Tropferoberfläche nicht und wischen Sie diese auch nicht ab.

easydrop Hyaluron liquid darf aus hygienischen Gründen nur von derselben Person benutzt werden.

#### **Wie lange kann easydrop Hyaluron liquid angewendet werden?**


Die Dauer der Anwendung ist nicht beschränkt. easydrop Hyaluron liquid ist zur Daueranwendung geeignet.

Wenn Ihre Beschwerden länger anhalten oder sich verstärken, sollten Sie jedoch einen Augenarzt um Rat fragen.

#### **Wie lange ist easydrop Hyaluron liquid haltbar?**



Sie dürfen easydrop Hyaluron liquid nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

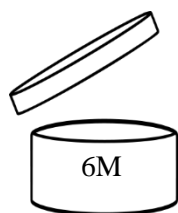

Nach Anbruch der Flasche ist easydrop Hyaluron liquid 6 Monate haltbar.

#### **Wie ist easydrop Hyaluron liquid aufzubewahren?**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Nicht unter 2 °C und nicht über 25 °C aufbewahren.

Bewahren Sie die Flasche in der Faltschachtel auf.

**STERILE A**

**Packungsgröße:**

1 Tropfflasche mit 10 ml Lösung

**Hersteller:**



mibe GmbH Arzneimittel  
Münchener Str. 15  
06796 Brehna  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 34954/247-0  
Fax: +49 (0) 34954/247-100

(Vertrieb: ...)

**Stand der Information**

Januar 2020

CE0483

**MD**

Medizinprodukt